

ざっくり！！フェイスガードの作り方

用意する物：クリアファイル はさみ 透明セロファンテープ等 サランラップ

- 1 型をつくる（A4の紙を用意）
- 2 型紙をクリアファイルに入れる
- 3 型紙に合わせて①と②をカット。
③のSまで切込みを入れる
- 4 点線を折り曲げ頭に装着して、自分のサイズに合わせる
※首元まで隠す→①を広く切るなど
※あたまのサイズに合わせてM、Lまで切り込みを入れる
- 5 目の位置に合わせて外側から印をつける
(㊟→テープを貼る。マジック等)
- 6 視界をクリアにするために、
(A)ファイルの内側から目の位置へ透明のセロファンテープなどを貼る
(B)ファイルの目の位置を大まかにくりぬき、内側からラップを貼る
- 7 外側の㊟をはがし、完成！！

※あくまでも飛沫防止のもので、マスクはつけましょう。

※脱着時にはファイルの内側だけに触れるようにしましょう。

※消毒を毎日行いましょう。塩素の噴霧消毒は危険です。手袋をしてふき取るように消毒してください。

※作業に合わせて、首より下もカバーできるものがよいか（歯科衛生士さんなど）、上側をカバーすべきか（受付・食事介助など）を考えて作成することができます。

明るい社会づくり運動広島県

備北協議会 会長 高畑隆雄

連絡先 090-9731-1528

引用 PANDAID <https://www.pandaaid.jp/hygiene/face-shield> より